

APARAT SŁUCHOWY CLEAR TONE 16™



Niniejszy dokument ma charakter skróconej instrukcji obsługi (szybkie uruchomienie). Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z pełną instrukcją użytkownika, w tym przede wszystkim z przeciwwskazaniami oraz potencjalnymi działaniami niepożądanymi.

Problemy napotkane podczas noszenia

Brak dźwięku podczas noszenia?

Jeśli nie ma dźwięku:

Sprawdź, czy program głośności jest do stosowany do Twojego słuchu. Sprawdź, czy aparat słuchowy ma zasilanie (czy jest naładowany/ma baterię). Sprawdź, czy kanał słuchowy jest drożny i czy woskowina nie blokuje dźwięku z aparatu.

Uwaga: Jeśli aparat słuchowy milczy lub dźwięk staje się słaby z powodu zablokowania wylotu dźwięku, należy wyczyścić wylot dźwięku.

Zapoznaj się z informacjami przed użyciem



Ważne jest, aby upewnić się, że Twoje uszy są czyste przed założeniem aparatów słuchowych. Weź patyczek higieniczny i oczyść woskowinę wokół ucha zewnętrznego.

Uwaga: nie wsuwaj patyczka higienicznego do wnętrza ucha! czyść wyłącznie zewnętrzną część uszu!

Jeśli w uchu nagromadzi się zbyt dużo woskowiny, zablokuje ona dźwięk płynący z aparatów słuchowych.

1

Dlaczego słysząc wycie (ostry dźwięk)?

Wycie (ostry dźwięk/sprzężenie) jest objawem normalnego działania aparatów słuchowych. Dzieje się tak, gdy aparat słuchowy i kanał słuchowy nie są całkowicie dopasowane, co powoduje, że dźwięk z odbiornika jest ponownie wychwytywany przez mikrofon. Dźwięk tworzy pętlę, która jest stale wzmacniana, co generuje wycie.



Rozwiązanie: Produkt jest wyposażony we wkładki douszne w różnych rozmiarach. Prosimy o wybranie wkładek, które najlepiej pasują do Twojego kanału słuchowego.

5

Prawidłowy sposób użytkowania urządzenia

Wybierz rozmiar kopułki (nasadki), który Twoim zdaniem będzie pasował do Twoich uszu. Może być konieczne wypróbowanie kilku różnych rozmiarów, zanim znajdziesz ten idealnie



dopasowany. Ostrożnie zsuń kopułkę z aparatu słuchowego, a następnie nasuń nową. Włóż aparat słuchowy do kanału słuchowego. Powinien on być dobrze dopasowany, stabilny i wygodny. Jeśli tak nie jest, wypróbuj kopułkę w innym rozmiarze.

2

Włączanie / Wyłączanie

Ustaw przełącznik aparatu słuchowego w pozycji „ON” – usłyszysz komunikat „power on”. Odczekaj 15 sekund, aż aparat zacznie działać. Ustaw przełącznik aparatu słuchowego w pozycji „OFF”, aby wyłączyć urządzenie.



Podczas noszenia aparatów słuchowych nie należy zakrywać mikrofonu znajdującego się powyżej. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 10-12 godzin.

6

Uwaga: Upewnij się, że wybierasz wkładki douszne, które pasują do Twojego kanału słuchowego i noś je prawidłowo, aby jak najlepiej przylegały do uszu. Jeśli nie zostaną założone poprawnie, mogą pojawić się echa (piski/dźwięki)



Uwaga: Po założeniu możesz włączyć aparat słuchowy, aby wyregulować głośność i program!

3

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, przesunij pokrętkę w górę. Analogicznie, obrót w dół (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) spowoduje jej zmniejszenie.



7

4

Przełączanie trybów

Dostosuj tryb po założeniu urządzenia. Dostępne są trzy tryby słyszenia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku „M” wywoła komunikat głosowy informujący o wybranym trybie:

A. Komunikat „Mode One”

wejdzie w tryb inteligentny (Intelligent Mode).

B. Komunikat „Mode Two”

wejdzie w tryb zewnętrzny (Outdoor Mode)

C. Komunikat „Mode Three”

wejdzie w tryb spotkania (Meeting Mode).



Uwaga: Tryby można zmieniać; wybierz odpowiedni tryb słyszenia w zależności od otoczenia, w którym się znajdujesz.

8

Ładowanie

L + białe paski: Lewy aparat ładuje się.

R + białe paski: Prawy aparat ładuje się.

Liczba [0–100]: Wskazuje pozostały poziom naładowania etui.



Dopóki liczba jest wyższa niż 0, możesz ładować aparaty, umieszczając je w etui.

9

Czas ładowania: Przy pierwszym użyciu zaleca się ładowanie przez 10–12 godzin, aby w pełni aktywować baterię i zapewnić jej optymalną wydajność. Używaj oryginalnego kabla: Zawsze korzystaj z dołączonego oryginalnego kabla, aby zapewnić bezpieczne połączenie i uniknąć problemów z wydajnością ładowania.

Pełne naładowanie aparatu słuchowego zajmuje około 2 godzin. Unikaj ładowania w ekstremalnych warunkach. Aby chronić żywotność baterii, utrzymuj temperaturę otoczenia w zakresie 5–35°C.

Ważne: Zaleca się ładowanie etui (za pomocą dołączonego kabla typu C), gdy poziom energii spadnie poniżej 30%.

10

21-dniowy plan noszenia

DROGA DO SŁYSZENIA

W przeciwieństwie do korekcji wzroku, która polega po prostu na założeniu okularów, korekcja słuchu jest procesem dość złożonym. Gdy rozpoczniesz swoją przygodę z poprawą słuchu, doświadczysz niezliczonych „nowych dźwięków”, a Twój mózg będzie potrzebował czasu na adaptację. Już po kilku tygodniach będziesz zszokowany dźwiękami, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, służymy pomocą z całego serca.



11

PIERWSZY TYDZIEŃ

Niektóre dźwięki mogą wydawać się zbyt głośne, gdy zakładasz aparat słuchowy po raz pierwszy, na przykład szum lodówki, szelest papieru czy odgłos Twoich kroków. To normalne – Twój mózg uczy się, jak nadawać tym dźwiękom priorytety. Bądź cierpliwy!

Cierpliwość:

Na początku noś aparat słuchowy przez 30 minut dziennie. Każdego dnia staraj się wydłużać czas noszenia o kolejne 30 minut.

12

Ćwiczenie:

Posłuchaj uważnie piosenki lub obejrzyj film, który dobrze znasz. Ciesz się możliwością ponownego słyszenia!

DRUGI TYDZIEŃ

Im więcej nosisz aparat słuchowy, tym bardziej adaptujesz się do różnych dźwięków w różnych środowiskach. Możesz nawet spróbować poprosić osoby w Twoim otoczeniu, aby nie mówiły już do Ciebie tak głośno. Komunikacja staje się teraz znacznie łatwiejsza.

13

TRZECI TYDZIEŃ

Po kilku tygodniach poczujesz się znacznie bardziej energiczny, ponieważ nie musisz już poświęcać tyle energii na próby usłyszenia tego, co mówią inni! Dźwięk stanie się czystszy i wyraźniejszy. Słuchanie stanie się naturalne. Znowu będziesz cieszyć się dźwiękami, które towarzyszą Ci w życiu.


Uczestnictwo:

jedz posiłek w restauracji z przyjaciółmi, obejrzyj film w kinie, weź udział w rodzinnym spotkaniu i przestań się martwić, że ominą Cię ważne wspomnienia!

14

Jak wymienić filtr przeciwwoskowinowy?

Usuń stary: Wciśnij czarną końcówkę patyczka w zużyty filtr i go wyciągnij. **Włóż nowy:** Wciśnij drugą stronę patyczka (tę z filtrem) prosto w otwór aparatu. **Gotowe:** Powoli wyciągnij patyczek – filtr zostanie na miejscu.

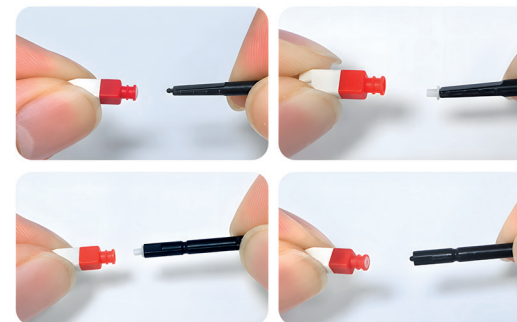

Pamiętaj: Wymieniaj filtr regularnie, aby zachować dobrą jakość dźwięku. Nie czyść zużytego filtra – zawsze wymieniaj go na nowy. Używaj wyłącznie filtrów przeznaczonych do Twojego modelu aparatu.